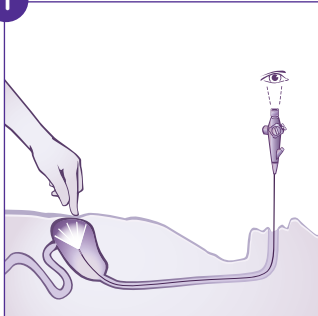
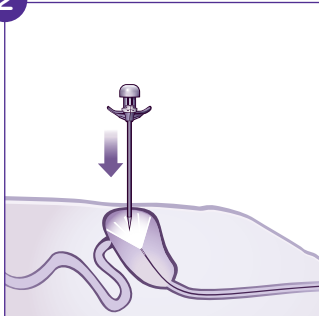
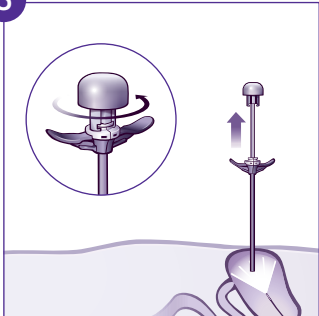
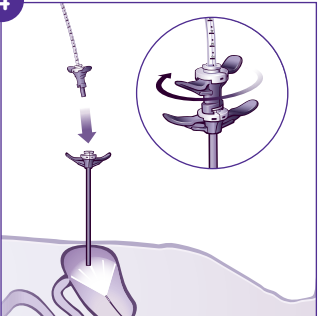


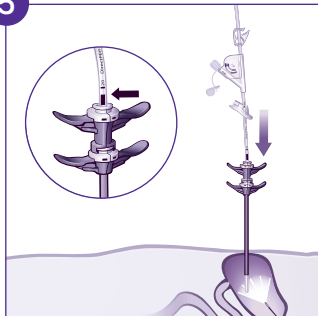
# FLOCARE® DirectPEG: KURZANLEITUNG\* FÜR DIE PLATZIERUNG.

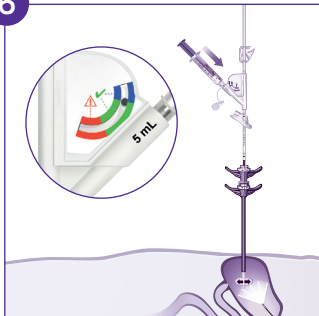
- 


1  
Luftinsufflation des Magens und Bestimmung der Punktionsstelle (Diaphanoskopie) sowie Lokalanästhesie.
- 

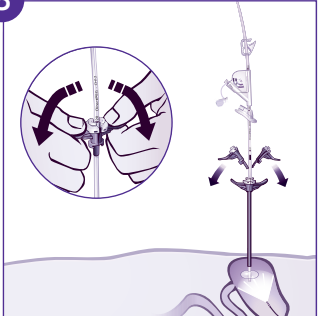
2  
Stichinzision und senkrecht Einbringen der Split-Kanüle mit innenliegendem Trokar unter leichtem Druck in den Magen.
- 

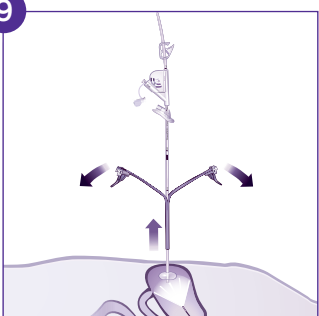
3  
Lösen der Arretierung des Trokars von der Split-Kanüle und Entfernung des Trokars. Luftdichtes Abdichten der Split-Kanüle ist nicht erforderlich.
- 

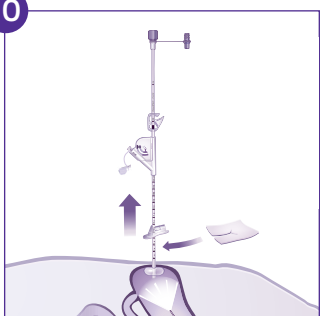
4  
Arretieren der Einführhilfe der Ballonsonde mit der Split-Kanüle.
- 

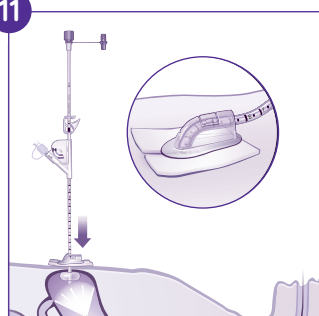
5  
Einführen der Ballonsonde durch die Split-Kanüle bis zur Einführmarkierung.
- 

6  
Die kleine weiße Ventilschutzkappe am Ballonfüllventil entfernen & werfen. Befüllen des Ballons (5 ml). Der Sondenindikator sollte sich am Ende des grünen bzw. am Anfang des blauen Bereiches befinden.
- 

7  
Spritze dekonnectieren → Indikatoranzeige bewegt sich etwa in den mittleren grünen Bereich.
- 

8  
Einführhilfe von der Split-Kanüle lösen und durch Auseinanderbrechen der Flügel entfernen.
- 

9  
Split-Kanüle aus dem Stoma ziehen und durch Auseinanderbrechen der Flügel entfernen.
- 

10  
Legen Sie eine Schlitzkomresse zwischen Stoma und externe Halteplatte.
- 

11  
Magen durch Zug an der Sonde an der Bauchdecke fixieren & durch Halteplatte sichern → Indikatorfeld sollte sich im blauen Bereich\*\* befinden. Verschließen Sie das Ballonfüllventil mit der weißen Kappe, die am Ventil befestigt ist.

\* Bitte die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung beachten.

\*\* Hinweis: Nach Ermessen des Arztes kann die Anzugskraft direkt nach der Sondenanlage so gewählt werden, dass die Anzeige im obersten grünen Bereich liegt.