




**SCHWERKRAFT-  
APPLIKATION MIT  
DEM SMARTPACK**

# SCHWERKRAFTAPPLIKATION MIT DEM SMARTPACK

SO FÜHREN SIE die Schwerkraftapplikation durch

- 1 Schütteln bzw. **schwenken** Sie den SmartPack vorsichtig. **Vermeiden** Sie dabei unbedingt eine **Blasenbildung**.
- 2 **Klappen** Sie die **Verschlusskappe** des SmartPacks **auf**.
- 3 Nehmen Sie das Überleitgerät aus der Packung und **schrauben** Sie es fest auf den SmartPack auf. **Verbinden** Sie dafür einfach den plusförmigen Anschluss am Überleitgerät mit dem plusförmigen Anschluss am SmartPack und **durchstoßen** Sie hierbei die innenliegende Folie.
- 4 **Schließen** Sie die **Rollenklemme**.
- 5 **Klappen** Sie die Aufhängevorrichtung **auf und hängen** Sie den SmartPack anschließend **an den Tisch-/Infusionsständer**.
- 6 **Drücken** Sie die **Tropfkammer** mehrmals zusammen und **füllen** Sie sie zu einem **Drittel**.

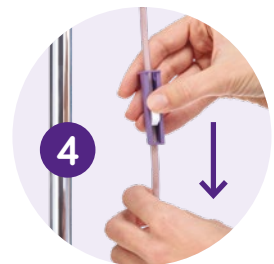


# SCHWERKRAFTAPPLIKATION MIT DEM SMARTPACK

SO FÜHREN SIE die Schwerkraftapplikation durch

- 7 Öffnen Sie jetzt die **Rollenklemme** und **füllen** Sie das **Überleitgerät** komplett mit der **Sondennahrung**.
- 8 **Schließen** Sie anschließend die **Rollenklemme**.
- 9 Entfernen Sie die **Verschlusskappe** am unteren Ende des **Überleitgerätes** und **verbinden** Sie das **Überleitgerät** mit der **Ernährungssonde** (Schraubverbindung).
- 10 Öffnen Sie jetzt wieder die **Ritsch-Ratsch-Klemme** an der PEG sowie die **Rollenklemme am Überleitgerät**, bis die gewünschte Tropfgeschwindigkeit erreicht ist.

1 min = 40 Tropfen

- 11 **Vor und nach** Gabe mit **20-40 ml** Flüssigkeit spülen.

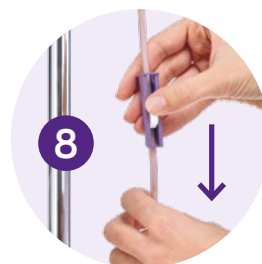

HIER GEHT'S ZUM VIDEO SCHWERKRAFTAPPLIKATION SMARTPACK

[www.nutricia.de/services/produktservices/videos/verabreichen-von-sondennahrung-im-smartpack-per-schwerkraft](http://www.nutricia.de/services/produktservices/videos/verabreichen-von-sondennahrung-im-smartpack-per-schwerkraft)